




# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_

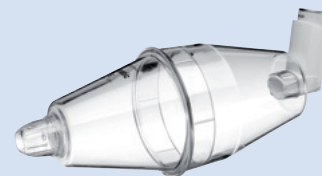

## Inhalatieprotocol dosisaërosol met Volumatic® (voor kinderen)

*Vanaf leeftijd 4 jaar*

### Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

### Vorbereiding

#### *Voor het eerste gebruik:*

2. De Volumatic® voor het eerste gebruik afwassen (zie kopje schoonmaken).  
 3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.  
 4. Krachtig schudden en 3 doses wegspuiten buiten de Volumatic®.

#### *Voor elk gebruik:*

5. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.  
 6. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegspuiten buiten de Volumatic®.  
 7. De mond moet leeg zijn.  
 8. Zet de Volumatic® in elkaar.  
 9. Controleer de werking van de klep (bij het schudden van de Volumatic® moet de klep goed hoorbaar zijn).  
 10. Schud de dosisaërosol krachtig.  
 11. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in het achterstuk van de Volumatic®.  
 12. De dosisaërosol met Volumatic® is nu klaar voor gebruik.


### De inhalatie

13. Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.  
 14. Houd de Volumatic® horizontaal en plaats het mondstuk tussen de tanden, laat het kind de lippen eromheen sluiten. Zorg dat de uitstroomopeningen vrij blijven.  
 15. – Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.  
– Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van de inademing.  
– **Laat het kind 10 keer rustig in- en uitademen** door de Volumatic®, de klep moet hoorbaar open en dicht gaan.  
 16. Indien meerdere inhalaties per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Volumatic® halen. Herhaal vervolgens vanaf punt 10. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de Volumatic®.



# LAN

Long Alliantie Nederland

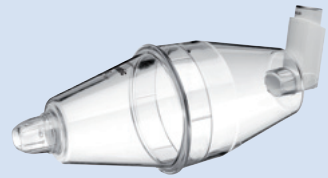

- 17. Verwijder de dosisaërosol uit de Volumatic®. Plaats de beschermdop van de dosisaërosol terug op de dosisaërosol.
- 18. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje door slikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken.

## Schoonmaken

- 19. Volumatic® één maal per week schoonmaken.
- 20. Haal de Volumatic® uit elkaar.
- 21. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 22. De Volumatic® niet afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen.
- 23. Laat de Volumatic® aan de lucht drogen.
- 24. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Volumatic® weer in elkaar zet.

## Aandachtspunten

- 25. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 26. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 27. De Volumatic® eenmaal per jaar vervangen.

## Tenslotte

- 28. Verwijs naar [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl) voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.