



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol met Space Chamber® Plus met mondstuk (voor kinderen)

Vanaf leeftijd 4 jaar

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. De Space Chamber® voor het eerste gebruik afwassen (zie kopje schoonmaken).
 3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 4. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten buiten de Space Chamber.

Voor elk gebruik:

5. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 6. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten buiten de Space Chamber.
 7. De mond moet leeg zijn.
 8. Schud de dosisaërosol krachtig.
 9. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in het achterstuk van de Space Chamber®.
 10. De dosisaërosol met Space Chamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

11. Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
 12. Houd de Space Chamber® horizontaal en plaats het mondstuk tussen de tanden, laat het kind de lippen eromheen sluiten.
 13a. *De standaardmethode*
– Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.
– Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van de inademing.
– **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen** door de Space Chamber®,
 13b. *Indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener: 1-teug methode:*
– Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.
– Druk de dosisaërosol in bij het begin van de inademing.
– **Laat het kind één keer rustig en zo diep mogelijk inademen** en vervolgens 10 seconden de adem vasthouden.
 14. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Space Chamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf punt 8. Spuit niet meer dan 1 dosis tegelijk in de Space Chamber®.

Inhalatieprotocol dosisaërosol met Space Chamber® Plus met mondstuk (voor kinderen) - versie 3.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland



- 15. Verwijder de dosisaërosol uit de Space Chamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.
- 16. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken.

Schoonmaken

- 17. Space Chamber® éénmaal per week schoonmaken.
- 18. Haal de Space Chamber® uit elkaar. Verwijder het flexibele achterstuk (duim erin en trekken).
- 19. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 20. De Space Chamber® niet afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen.
- 21. Laat de Space Chamber® aan de lucht drogen.
- 22. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Space Chamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 23. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses traven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 24. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 25. De Space Chamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 26. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.