



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol met InspiraChamber® met masker (voor kinderen)

Vanaf leeftijd 0 tot 4 jaar

Let op goede pasvorm van het masker, afgestemd op het kind

Een indicatie hiervoor is:

Vanaf leeftijd 0 tot 6 maanden: maat small.

Vanaf leeftijd 6 maanden tot 4 jaar: maat medium.

Vanaf leeftijd 4 jaar waarbij bewuste inhalatie met mondstuk niet mogelijk is: volwassen masker of kindermasker medium als de pasvorm daarvan beter is.

Elke InspiraChamber® voorzetskamer kinderverpakking met masker (klein en medium) bevat 2 maskers: één Soother Mask (met speen doorvoer) en één InspiraMask (zonder speendoorvoer)

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Voorbereiding

Voor eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
3. Krachtig schudden en 3 doses wegspreiden buiten de InspiraChamber®.

Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaerosol als de InspiraChamber®.
5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis weg spreiden buiten de InspiraChamber®.
6. De mond moet leeg zijn.
7. Schud de dosisaërosol krachtig.
8. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden recht vooruit in het achterstuk van de InspiraChamber®.
9. De dosisaërosol met InspiraChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie met InspiraMask (bevat geen opening voor een fopspeen)

10. Zet de InspiraMask op de InspiraChamber® zodat deze goed aansluit.
11. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
12. Houd de InspiraChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.

Inhalatieprotocol dosisaërosol met InspiraChamber® met masker (voor kinderen) - versie 2.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



- 13. – Druk de dosisaërosol 1 keer in.
 - **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen** door de InspiraChamber®. De SealVision visuele indicator moet zichtbaar open en dicht gaan.
 - Het masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer ervoor te zorgen dat het kind niet huilt.
- 14. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig laten inhaleren (indien mogelijk).
- 15. Indien meerdere inhalaties per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de InspiraChamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf punt 7. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de InspiraChamber®.
- 16. Verwijder de dosisaërosol uit de InspiraChamber®. Plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.
- 17. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

De inhalatie met SootherMask (bevat opening voor een fopspeen)

- 10. Zet de Soothermask op de InspiraChamber® zodat deze goed aansluit.
- 11. Plaats de fopspeen van het kind in de SootherMask. (om het plaatsen van de speen te vereenvoudigen, kan de speen wat bevochtigd worden.)
- 12. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
- 13. Houd de InspiraChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind en laat het kind op de speen zuigen.
- 14. – Druk de dosisaërosol 1 keer in.
 - **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen** door de InspiraChamber®. De SealVision visuele indicator moet zichtbaar open en dicht gaan.
 - Masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer ervoor te zorgen dat het kind niet huilt.
- 15. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig laten inhaleren (indien mogelijk).
- 16. Indien meerdere inhalaties per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de InspiraChamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf punt 7. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de InspiraChamber®.
- 17. Verwijder de dosisaërosol uit de InspiraChamber®. Plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.
- 18. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Schoonmaken

- 19. InspiraChamber® éénmaal per week schoonmaken.
- 20. Haal de InspiraChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en het masker van de InspiraChamber®.
- 21. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 22. De InspiraChamber® afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen.
- 23. Laat de InspiraChamber® en onderdelen aan de lucht drogen.
- 24. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de InspiraChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 25. Bereken wanneer de dosisaerosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaerosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaerosolen hebben een teller.
- 26. Bewaar de dosisaerosol op kamertemperatuur.
- 27. De InspiraChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 28. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.

Inhalatieprotocol dosisaërosol met InspiraChamber® met masker (voor kinderen) - versie 2.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl