



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol Novolizer®

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. Druk de geribbelde vlakken aan beide zijden van het deksel zachtjes in, schuif het deksel naar voren en til het op.
3. Verwijder de folie van de patroonhouder, plaats het patroon in de Novolizer® met de dosisteller naar het mondstuk gericht.
4. Plaats het deksel in omgekeerde volgorde terug tot het op z'n plaats klikt.

Voor elk gebruik:

5. De mond moet leeg zijn.
6. Houd de Novolizer® horizontaal met de gekleurde knop naar boven. Verwijder de beschermdop van het mondstuk.
7. Druk de knop aan de achterzijde volledig in. Er volgt een dubbele klik en laat de gekleurde knop weer los. Doe dit alleen vlak voor de inhalatie.
8. Kijk of het controlevenster groen is.
9. De Novolizer® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

10. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
11. **Adem langzaam en volledig uit**, niet in de Novolizer®.
12. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.
13. **Inhaleer zo diep mogelijk met een krachtige inademing**. Binnen de eerste seconde volgt een klik. Stop niet, ga door met inademen.
14. Houd de adem 10 seconden vast of zolang als comfortabel is. Neem intussen de Novolizer® uit de mond.
15. Adem rustig uit.
16. Controleer of de kleur van het controlevenster in rood is veranderd.
17. Herhaal vanaf stap 7 indien een tweede inhalatie is voorgeschreven.
18. Plaats de beschermdop op het mondstuk.
19. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of zo nodig iets eten of drinken.

Inhalatieprotocol Novolizer® - versie 2.0

Mede mogelijk gemaakt door Coöperatie VGZ

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland



Schoonmaken

- 20. alleen bij vervangen van de patroon.
- 21. Verwijder eerst het deksel en de patroon en vervolgens de beschermdop.
- 22. Verwijder het mondstuk door dit linksom te draaien.
- 23. Plaats de Novolizer® ondersteboven, pak het poederkanaal vast, trek het naar voren en til het op.
- 24. Maak het mondstuk, het poederkanaal en de inhalator schoon met een zachte, droge, pluïsvrije doek.
- 25. Eventuele poederresten zachtjes eruit kloppen. Gebruik geen water of reinigingsmiddel.
- 26. Montage: bevestig het poederkanaal door schuin in te steken) en het mondstuk (pinnetje in de groef en naar rechtsdraaien), plaats de beschermdop terug.

Aandachtspunten

- 27. De dosisteller geeft het aantal nog beschikbare doses aan.
- 28. Bewaar de Novolizer® op kamertemperatuur. Niet in de badkamer of de keuken.
- 29. Vervang de Novolizer® eenmaal per jaar.

Tenslotte

- 30. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.