




# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_

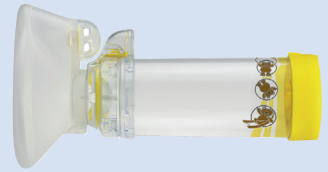

## Inhalatieprotocol dosisaërosol met Aerochamber met masker® (voor kinderen)

*Let op goede pasmaat van het masker, afgestemd op het kind*

### Een indicatie hiervoor is:

- voor kinderen tot 6 maanden: babymasker oranje
- voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar: kindermasker geel
- voor kinderen vanaf 4 jaar waarbij bewuste inhalatie met mondstuk niet mogelijk is: volwassen masker blauw of kindermasker geel als de pasvorm daarvan beter is

### Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

### Vorbereiding

#### Voor eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
3. Krachtig schudden en 3 doses wegsputen.

#### Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputen.
6. De mond moet leeg zijn.
7. Controleer de werking van de Flow-Vu indicator; plaats masker op vlakke ondergrond, druk de dosisaërosol zachtjes heen en weer, de ventielen bewegen zichtbaar.
8. Schud de dosisaërosol krachtig.
9. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de AeroChamber®.
10. De dosisaërosol met AeroChamber® is nu klaar voor gebruik.

### De inhalatie

11. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
12. Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.
13. – Druk de dosisaërosol 1 keer in.  
– **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen** door de Aerochamber®.  
De Flow-Vu indicator beweegt zichtbaar.  
– Het masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer ervoor te zorgen dat het kind niet huilt.

*Inhalatieprotocol dosisaërosol met Aerochamber met masker - versie 2.0*

*De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl)*




# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_

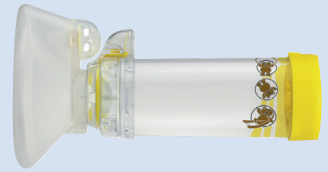

- 14. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de AeroChamber® halen en herhalen vanaf punt 8. Spuit niet meer dan 1 dosis tegelijk in de AeroChamber®.
- 15. Verwijder de dosisaërosol uit de AeroChamber®. Plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.
- 16. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

## Schoonmaken

- 17. AeroChamber® éénmaal per week schoonmaken.
- 18. Haal de AeroChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 19. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 20. De AeroChamber® afspoelen, niet afdrogen.
- 21. Laat de AeroChamber® aan de lucht drogen.
- 22. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de AeroChamber® weer in elkaar zet.

## Aandachtspunten

- 22. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 23. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 24. De AeroChamber® eenmaal per jaar vervangen.

## Tenslotte

- 25. Verwijs naar [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl) voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.