




# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_

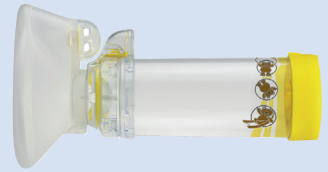

## Inhalatieprotocol dosisaërosol met Aerochamber met masker® (voor kinderen)

*<Let op goede pasmaat van het masker, afgestemd op het kind>*

### Een indicatie hiervoor is:

- voor kinderen tot 6 maanden: babymasker oranje.
- voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar: kindermasker geel.
- voor kinderen vanaf 4 jaar waarbij bewuste inhalatie met mondstuk niet mogelijk is: volwassen masker blauw of kindermasker geel als de pasvorm daarvan beter is.

### Patiënteninformatie

- Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

### Vorbereiding

#### Voor eerste gebruik:

- 1. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol als de AeroChamber®.
- 2. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten buiten de AeroChamber®.

#### Voor elk gebruik:

- 3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
- 4. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten buiten de AeroChamber®.
- 5. De mond moet leeg zijn.
- 6. Controleer de werking van de Flow-Vu indicator; plaats masker op vlakke ondergrond, druk de dosisaërosol zachtjes heen en weer, de ventielen bewegen zichtbaar.
- 7. Schud de dosisaërosol krachtig.
- 8. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in het achterstuk van de AeroChamber®.
- 9. De dosisaërosol met AeroChamber® is nu klaar voor gebruik.

### De inhalatie

- 10. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
- 11. Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.




# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_

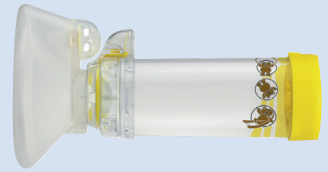

- 12. – Druk de dosisaërosol 1 keer in.
  - **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen** door de AeroChamber®.
  - De Flow-Vu indicator beweegt zichtbaar.
  - Het masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer ervoor te zorgen dat het kind niet huilt.
- 13. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de AeroChamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf punt 7. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de AeroChamber®.
- 14. Verwijder de dosisaërosol uit de AeroChamber®. Plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol. Niet op de AeroChamber®.
- 15. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

## Schoonmaken

- 16. AeroChamber® éénmaal per week schoonmaken.
- 17. Haal de AeroChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 18. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 19. De AeroChamber® afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen.
- 20. Laat de AeroChamber® aan de lucht drogen.
- 21. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de AeroChamber® weer in elkaar zet.

## Aandachtspunten

- 22. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 23. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 24. De AeroChamber® eenmaal per jaar vervangen.

## Tenslotte

- 25. Verwijs naar [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl) voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.