



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol Forspiro®

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. Open het transparante klepje van de zijkamer.
 3. Haal de foliestrip met zwarte strepen uit de zijkamer, afscheuren langs de perforatierand.

Voor elk gebruik:

4. De mond moet leeg zijn.
 5. Houd de Forspiro® rechtop met de beschermkap naar boven.
 6. Open de beschermkap van de Forspiro®.
 7. Til de rand van de witte hendel op en duw deze helemaal open tot u een 'klik' hoort.
 8. Sluit vervolgens de witte hendel tot u een 'klik' hoort. De dosisteller telt af.
 9. De Forspiro® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

10. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
 11. **Adem langzaam en volledig uit**, niet in de Forspiro®.
 12. Breng de Forspiro® horizontaal naar de mond.
 13. Plaats het mondstuk tussen de tanden met de lippen eromheen. Zorg dat de luchtgaten vrij blijven.
 14. **Inhaleer zo diep mogelijk met een gelijkmatige inademing.**
 15. Houd de adem 10 seconden vast of zo lang als comfortabel is. Neem intussen de Forspiro® uit de mond.
 16. Adem rustig uit.
 17. Herhaal vanaf stap 7 indien een tweede inhalatie is voorgeschreven.
 18. Sluit de Forspiro® door de beschermkap over het mondstuk te plaatsen.
 19. Open het transparante klepje van de zijkamer.
 20. Verwijder de lege strips door deze langs de tanden van de zijkamer af te scheuren.
 21. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of zo nodig iets eten of drinken.

Inhalatieprotocol Forspiro® - versie 1.0



LAN

Long Alliantie Nederland



Schoonmaken

- 22. Het mondstuk afnemen met een droge tissue, nooit afspoelen.

Aandachtspunten

- 23. De Forspiro® bevat 60 inhalaties, de teller geeft het aantal resterende inhalaties aan.
- 24. Bewaar de Forspiro® op kamertemperatuur.

Tenslotte

- 25. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.