



# LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Instructeur: \_\_\_\_\_



## Inhalatieprotocol dosisaërosol met Vortex® met grootmasker

*LET OP: Masker alleen gebruiken als mondstuk niet kan.*

### Patiënteninformatie

- Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

### Vorbereiding

#### Voor eerste gebruik:

1. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaerosol als de Vortex®.
2. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten buiten de Vortex®.

#### Voor elk gebruik:

3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
4. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten buiten de Vortex®.
5. De mond moet leeg zijn.
6. Schud de dosisaërosol krachtig.
7. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit (in het achterstuk) van de Vortex®.
8. De dosisaërosol met Vortex® is nu klaar voor gebruik.

### De inhalatie

9. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
10. Houd de Vortex® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus.
- Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van een rustige inademing.
  - **5 keer rustig in- en uit ademen** door de Vortex®. Het masker goed aangesloten houden totdat de patiënt klaar is.
11. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Vortex® halen. Herhaal vervolgens vanaf stap 5. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de Vortex®.
12. Verwijder de dosisaërosol uit de Vortex®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol. Niet op de Vortex®.
13. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

*Inhalatieprotocol dosisaërosol met Vortex® met grootmasker - versie 1.0*

*De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl)*



# LAN

Long Alliantie Nederland



## Schoonmaken

- 14. Vortex® één maal per week schoonmaken.
- 15. Haal de Vortex® uit elkaar. Verwijder het mondstuk van de Vortex®.
- 16. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 17. De Vortex® afspoelen en goed uitschudden.
- 18. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Vortex® weer in elkaar zet.

## Aandachtspunten

- 19. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 20. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 21. De Vortex® eenmaal per jaar vervangen.
- 22. Bij de Vortex® is een hulpstuk voor één handbediening en/of mensen met verminderde spierkracht verkrijgbaar. Let op, deze éénhandbediening past niet op alle aërosolen.

## Tenslotte

- 23. Verwijs naar [www.inhalatorgebruik.nl](http://www.inhalatorgebruik.nl) voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.