



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaerosol met Vortex® met masker (voor kinderen)

<Let op de goede pasmaat van het masker, afgestemd op het kind>

Een indicatie hiervoor is:

- voor kinderen tot 2 jaar: kindermasker oranje (kever)
- voor kinderen van 2 tot 4 jaar: kindermasker groen (kikker)
- voor kinderen vanaf 4 jaar waarbij bewuste inhalatie met mondstuk niet mogelijk is: volwassenenmasker blauw of kindermasker groen (kikker) als de pasvorm daarvan beter is.

Patiënteninformatie

- Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor eerste gebruik:

1. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaerosol als de Vortex®.
2. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten buiten de Vortex®.

Voor elk gebruik:

3. Verwijder de beschermdop van de dosisaerosol.
4. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten buiten de Vortex®.
5. De mond moet leeg zijn.
6. Schud de dosisaerosol krachtig.
7. Plaats de dosisaerosol met de opening naar beneden en recht vooruit in (de achterkant van) de Vortex®.
8. De dosisaerosol met Vortex® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

9. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
10. Houd de Vortex® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.
11. – Druk de dosisaerosol 1 keer in.
– **Laat het kind 5 tot 10 keer rustig in- en uitademen** door de Vortex®.
– Het masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer ervoor te zorgen dat het kind niet huilt.

Inhalatieprotocol dosisaerosol met Vortex® met masker (voor kinderen) - versie 1.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland



- 12. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Vortex® halen. Herhaal vervolgens vanaf stap 5. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de Vortex®.
- 13. Verwijder de dosisaërosol uit de Vortex®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol. Niet op de Vortex®.
- 14. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

Schoonmaken

- 15. Vortex® één maal per week schoonmaken.
- 16. Haal de Vortex® uit elkaar. Verwijder het masker van de Vortex®.
- 17. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 18. De Vortex® afspoelen en goed uitschudden.
- 19. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Vortex® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 20. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 21. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 22. De Vortex® eenmaal per jaar vervangen.
- 23. Bij de Vortex® is een hulpstuk voor één handbediening en/of mensen met verminderde spierkracht verkrijgbaar. Let op, deze éénhandbediening past niet op alle aërosolen.

Tenslotte

- 24. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.