

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____

Inhalatieprotocol Neutec Airmaster

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

2. De mond moet leeg zijn
3. Houd de Neutec Airmaster inhalator horizontaal, met de teller naar boven
4. Open de Neutec Airmaster vlak voor gebruik door de rode veiligheidsknop in te drukken en tegelijkertijd volledig de beschermkap te openen (klik)
5. De inhalator is nu klaar voor gebruik

De inhalatie

6. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achter over
7. Adem langzaam en volledig uit, niet in de Neutec Airmaster
8. Breng de Neutec Airmaster horizontaal naar de mond
9. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen
10. Inhaleer zo diep mogelijk met een gelijkmatige inademing
11. Houd de adem 10 seconden vast of zolang als comfortabel is, neem ondertussen de Neutec inhalator uit de mond
12. Adem rustig uit
13. Sluit de beschermkap van de inhalator volledig totdat u een klik hoort
14. Herhaal vanaf stap 4 indien een tweede inhalatie is voorgeschreven
15. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of zonodig iets eten of drinken

Schoonmaken

15. Het mondstuk afnemen met een droge tissue, nooit afspoelen

Aandachtspunten

16. De Neutec Airmaster bevat 60 inhalaties, de teller geeft het aantal resterende inhalaties aan
17. Bewaar de Neutec Airmaster op kamertemperatuur, niet in de badkamer of de keuken.

Tenslotte

18. Verwijs naar **www.inhalatorgebruik.nl** voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.