



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol AeroChamber® met grootmasker

LET OP: Masker alleen gebruiken als mondstuk niet kan.

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaerosol als de AeroChamber®.
 3. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten buiten de AeroChamber®.

Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten buiten de AeroChamber®.
 6. De mond moet leeg zijn.
 7. Schud de dosisaërosol krachtig.
 8. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in het achterstuk van de AeroChamber®.
 9. De dosisaërosol met AeroChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

10. Ga rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
 11. **Adem volledig uit.**
 12. Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus.
– Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van een rustige inademing.
– **5 keer rustig in- en uit ademen** door de AeroChamber®. Het masker goed aangesloten houden totdat de patiënt klaar is.
De Flow-Vu indicator beweegt zichtbaar.
 13. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de AeroChamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf punt 7. Spuit niet meer dan één dosis tegelijk in de AeroChamber®.
 14. Verwijder de dosisaërosol uit de AeroChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol. Niet op de AeroChamber®.
 15. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken.
Was vervolgens het gezicht.

Inhalatieprotocol AeroChamber® met grootmasker - versie 3.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Schoonmaken

- 16. AeroChamber® één maal per week schoonmaken
- 17. Haal de AeroChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 18. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 19. De AeroChamber® afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen.
- 20. Laat de AeroChamber® aan de lucht drogen.
- 21. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de AeroChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 22. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 23. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 24. De AeroChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 25. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor de patiënt.