



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaerosol met AeroChamber® met mondstuk (voor kinderen)

vanaf leeftijd 4 jaar

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. Verwijder de beschermdop van zowel de dosisaërosol als de AeroChamber®.
3. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten buiten de AeroChamber®.

Voor elk gebruik:

4. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
5. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten buiten de AeroChamber®.
6. De mond moet leeg zijn.
7. Schud de dosisaërosol krachtig.
8. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in het achterstuk van de AeroChamber®.
9. De dosisaërosol met AeroChamber® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

10. Laat het kind rechtop zitten of staan, het hoofd iets achterover.
11. Houd de AeroChamber® horizontaal en plaats het mondstuk tussen de tanden, laat het kind de lippen eromheen sluiten.
- 12a. *De standaardmethode*
- Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.
 - Druk de dosisaërosol 1 keer in bij het begin van de inademing.
 - **Laat het kind 5 keer rustig in- en uitademen** door de AeroChamber®, de Flow-Vu indicator beweegt zichtbaar.
- 12b. *Indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener: 1-teug methode:*
- Laat het kind, indien mogelijk, volledig uitademen.
 - Druk de dosisaërosol in bij het begin van de inademing.
 - **Laat het kind één keer rustig en zo diep mogelijk inademen** en vervolgens 10 seconden de adem vasthouden.
13. Bij een fluittoon tijdens het inhaleren minder krachtig inhaleren.

Inhalatieprotocol dosisaërosol met AeroChamber® met mondstuk (voor kinderen) - versie 3.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland



- 14. Indien meerdere inhalaties zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de AeroChamber® halen. Herhaal vervolgens vanaf punt 7. Spuit niet meer dan 1 dosis tegelijk in de AeroChamber®.
- 15. Verwijder de dosisaërosol uit de AeroChamber®, plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol. Niet op de AeroChamber®.
- 16. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken.

Schoonmaken

- 17. AeroChamber® éénmaal per week schoonmaken.
- 18. Haal de AeroChamber® uit elkaar. Verwijder het achterstuk en draai het voorstuk tegen de klok in los.
- 19. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 20. De AeroChamber® afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen.
- 21. Laat de AeroChamber® aan de lucht drogen.
- 22. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de AeroChamber® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 23. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 24. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 25. De AeroChamber® eenmaal per jaar vervangen.

Tenslotte

- 26. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.