



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol met Babyhaler® met masker (voor kinderen)

Voor leeftijd 1-4 jaar

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

2. De Babyhaler® voor het eerste gebruik afwassen (zie kopje schoonmaken).
 3. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 4. Krachtig schudden en 3 doses wegsputten buiten de babyhaler.

Voor elk gebruik:

5. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
 6. Langer dan 1 week niet gebruikt: krachtig schudden en 1 dosis wegsputten buiten de babyhaler.
 7. De mond moet leeg zijn.
 8. Zet de Babyhaler® in elkaar.
 9. Controleer de werking van de blauwe ventielen; plaats masker op vlakke ondergrond, druk de Babyhaler® zachtjes heen en weer, de ventielen bewegen zichtbaar.
 10. Schud de dosisaërosol krachtig.
 11. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in het achterstuk van de Babyhaler®.
 12. De dosisaërosol met Babyhaler® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

13. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
 14. Houd de Babyhaler® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.
 15. – Druk de dosisaërosol 1 keer in.
– **Laat het kind 10 keer rustig in- en uitademen** door de Babyhaler®, de ventielen bewegen zichtbaar.
– Het masker goed aangesloten houden tot het kind klaar is en probeer er voor te zorgen dat het kind niet huilt.
 16. Indien meerdere inhalaties per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Babyhaler® halen. Herhaal vervolgens vanaf punt 10. Spuit niet meer dan 1 dosis tegelijk in de Babyhaler®.

Inhalatieprotocol Babyhaler® met masker voor kinderen - versie 3.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



LAN

Long Alliantie Nederland



- 17. Verwijder de dosisaërosol van de Babyhaler®. Plaats de beschermdop terug op de dosisaërosol.
- 18. Na inhalatie de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken of indien dit niet mogelijk is iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

Schoonmaken

- 19. Babyhaler® éénmaal per week schoonmaken.
- 20. Haal de Babyhaler® uit elkaar.
- 21. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 22. De Babyhaler® niet afspoelen, goed uitschudden en niet afdrogen.
- 23. Laat de Babyhaler® aan de lucht drogen.
- 24. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens u de Babyhaler® weer in elkaar zet.

Aandachtspunten

- 25. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg is. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 26. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 27. De Babyhaler® eenmaal per jaar vervangen.
- 28. Vervang de ventielen na 6 maanden bij dagelijks gebruik of eerder als ze beschadigd zijn.

Tenslotte

- 29. Verwijs naar www.inhalatorgebruik.nl voor een passende instructiefilm en gebruiksaanwijzingen voor kind en ouders.