



LAN

Long Alliantie Nederland

Naam: _____

Datum: _____

Instructeur: _____



Inhalatieprotocol dosisaërosol Babyhaler® met masker (voor kinderen)

Vanaf leeftijd 1-4 jaar

Patiënteninformatie

1. Bespreek het doel en de werking van de medicatie.

Vorbereiding

Voor het eerste gebruik:

Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje. De Babyhaler® niet afspoelen, niet afdrogen. Bij een nieuwe dosisaërosol: schudden en 3 doses wegspuiten; één week of langer niet gebruikt: schudden en één dosis wegspuiten.

Voor elk gebruik:

2. De mond moet leeg zijn.
3. Zet de Babyhaler® in elkaar.
4. Controleer de werking van de blauwe ventielen; plaats masker op vlakke ondergrond, druk Babyhaler® zachtjes heen en weer, de ventielen bewegen zichtbaar.
5. Verwijder de beschermdop van de dosisaërosol.
6. Schud de dosisaërosol krachtig.
7. Plaats de dosisaërosol met de opening naar beneden en recht vooruit in de Babyhaler®. De dosisaërosol met Babyhaler® is nu klaar voor gebruik.

De inhalatie

8. Laat het kind rechtop zitten op schoot, op een stoel of eventueel staan, het hoofd iets achterover.
9. Houd de Babyhaler® horizontaal en plaats het masker goed aangesloten op het gezicht over mond en neus van het kind.
10. - Druk de dosisaërosol 1 keer in.
- Laat het kind 10 keer rustig in- en uitademen door de Babyhaler®. Masker goed aangesloten houden en niet huilen. De ventielen in de Babyhaler® bewegen zichtbaar.
11. Indien meerdere doseringen per keer zijn voorgeschreven, de dosisaërosol uit de Babyhaler® halen en herhalen vanaf punt 6. Spuit niet meer dan één pufje tegelijk in de Babyhaler®.
12. Verwijder de dosisaërosol van de Babyhaler®, plaats de beschermdop terug.
13. Na inhalatie van inhalatiecorticosteroiden de mond en keel spoelen: het eerste slokje gorgelen en uitspugen, het tweede slokje doorslikken. Indien dit niet mogelijk is dan iets eten of drinken. Was vervolgens het gezicht.

Inhalatieprotocol Babyhaler® met masker voor kinderen - versie 1.0

De LAN moedigt verspreiding van de protocollen aan. De meest actuele versie en de gebruiksvoorwaarden vindt u op www.inhalatorgebruik.nl



Schoonmaken

- 14. Babyhaler® één maal per week schoonmaken.
- 15. Haal de Babyhaler® uit elkaar.
- 16. Was de onderdelen in een lauw en schoon afwassopje.
- 17. De Babyhaler® niet afspoelen, niet afdrogen.
- 18. Laat de Babyhaler® aan de lucht drogen.
- 19. Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn alvorens de Babyhaler® weer in elkaar gezet wordt.

Aandachtspunten

- 20. Bereken wanneer de dosisaërosol leeg zal zijn. Op de zijkant van de dosisaërosol staat hoeveel doses erin zitten; eventueel de doses turven en de datum van aanbreken noteren. Sommige dosisaërosolen hebben een teller.
- 21. Bewaar de dosisaërosol op kamertemperatuur.
- 22. De Babyhaler® eenmaal per jaar vervangen.
- 23. Vervang de ventielen na zes maanden bij dagelijks gebruik of eerder als ze beschadigd zijn.

Tenslotte

- 24. Verwijs naar een filmpje dat aansluit bij dit inhalatieprotocol.